

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. FÖRORD | 6. HÅLLBARHET |
| 2. LEVERANSENS INNEHÅLL | 7. RENGÖRING OCH DESINFICERING |
| 3. ANVÄNDNING | 8. KONTRAINDIKATIONER |
| 4. VIKTIG INFORMATION | 9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE |
| 5. MATERIALINFORMATION | 10. KONTAKT |

1. FÖRORD

Reha-set från NOVAFON är ett komplement till de tillbehör som redan in går i leveransen av NOVAFONs ljudvågsapparater för att behandla smärta lokalt med hjälp av vibrationer. De får endast användas tillsammans med en sådan produkt. Läs noga igenom följande sidor så att du alltid kan använda tillbehören på rätt sätt.

2. LEVERANSENS INNEHÅLL

Leveransen innehåller en koniskt massagehuvud, en massagehuvud med piggar, en Platt massagehuvud XL och en manual. Det setet kan erhållas i vitt , antracit och svart (art. nr. 7016 / 7036/7021).

3. ANVÄNDNING

Tillsatserna fästs med en stickkoppling på enheten. För att ta bort till satserna från enheten behöver man bara vrida ett fjärdedels varv och dra lätt. För att sätta fast tillsatserna behöver man bara stoppa i dem. Man har hittat rätt läge för tillsatserna när enhetens och tillsatsens hållare ligger exakt över varandra. Magneterna gör det lättare att hitta ändpo sitionen. Innan du påbörjar någon behandling ska du kontrollera att res pektive tillsats har hakat fast i sin ändposition. Observera: Alla tillbehör kan användas direkt på huden eller verka genom textil. Ingen gel eller liknande behövs.

3.1 AVSEDD ANVÄNDNING

Apparater och tillbehör från NOVAFON är avsedda för att lindra smärta och främja muskelavslappning för att lindra symtom vid: · Akut smärta i muskuloskelettala systemet · Kronisk smärta i muskuloskelettala systemet · Neurorehabilitering · Röst- och sväljterapi

3.2 TYPISKA ANVÄNDNINGSEXEMPEL

Koniskt massagehuvud	Massagehuvud med piggar	Platt massagehuvud XL
Punktbehandling på trigger- och smärt-punkter	Speciell sensorisk stimulans	Behandling av stora ytor på rygg och lår
Exakt mobilisering av vävnadsskikt och ärrvävnad	Cirkelrörelser främjar genomblödningen	Ökad känsel från huvud till fot
Behandlar fina strukturer i ansikte, händer och fötter	Borstliknande yta behandlar smärtor i huvud och hårfäste	Helkroppsmassage vid träningsvärk

OBS: Vibrationsterapi lindrar främst symtom, men botar inte den underliggande sjukdomen. Användningen av REHAB-set ersätter inte ett besök hos läkaren. OBS: Användning av lokal vibrationsterapi för muskelavslappning vid neu rologiska sjukdomar eller röst- och sväljterapi bör endast utföras av kva lificerad personal (terapeuter, läkare, vårdpersonal) eller efter detaljerad instruktion av en sådan person. I alla fall används lokal vibrationsterapi som ett element i en holistisk terapiplan där muskelavslappning krävs för ytterligare övningar och trä ningselement. NOVAFON-enheter kan användas av personer i åldern 6 och över. Barn måste övervakas. Detsamma kan gälla för personer med nedsatt kognitiv eller motorisk kontroll (som ofta förekommer hos patien ter med spasticitet). OBSERVERA KONTRAINDIKATIONERNA i kapitel 8 och anvisningarna i kapitel 4. ANVÄND INTE för att behandla smärta eller svullnad av okänt ursprung. Kontakta i så fall en läkare för klargörande och diagnos.Exempel på an vändningssätt:

4. VIKTIG INFORMATION

- Vibrationerna kan upplevas olika av olika personer, beroende på hur känsliga de är. På särskilt känsliga ställen ska man behandla på den lägsta vibrationsnivån eller genom kläder eller ett tunt tyg
- Behandla varje enskild del i maximalt 20 minuter och låt sedan NOVAFON ljudvågsapparat stå och svalna i 15 minuter.
- Om den som behandlas mår illa, upplever yrsel eller förvärrade symp tom ska du avbryta behandlingen.
- Förvara tillbehören oåtkomligt för barn.
- Använd inte tillbehören på slemhinnor och öppna sår. ·
- Undvik stötar! Det kan skada produkterna och därigenom öka risken för personskador.
- NOVAFON tillbehör är endast avsedda att användas med Novafon-ljudvågsenheter. Användning med produkter från andra tillverkare är inte tillåten.
- OBSERVERA: När du använder dessa bilagor kan det genererade bull ret skilja sig från standardfästena. Slå inte på enheten förrän du har tagit fysisk kontakt.
- Läs även all information i bruksanvisningen till ljudvågsapparaten från NOVAFON innan du använder tillbehören.

5. MATERIALINFORMATION

Reha-tillbehören från NOVAFON är tillverkade av en kvalitetsplast för medicinskt bruk. Förvaras svalt, torrt och mörkt.

6. HÅLLBARHET

Tillbehörens hållbarhet kan variera beroende på hur ofta de används. Kontrollera alltid tillbehören före användning. Ersätt skadade och defor merade delar. Vi rekommenderar att man byter ut tillbehören efter två års användning. Betydligt tidigare om produkten används ofta. Observera att tillbehör betraktas som förbrukningsdelar och därför omfattas av en be gränsad garanti.

7. RENGÖRING OCH DESINFICERING

Om de används yrkesmässigt och kliniskt ska NOVAFON REHAB-tillbehö ren desinficeras med ett ytdesinfektionsmedel för medicinska produkter före och efter varje användning. Använd endast alkoholfria ytdesinfekti onsmedel (VAH eller IHO-listade) för känsliga ytor (t. ex. NOVACLEANER, NOVAFON GmbH; SinAlc sensitiv, Himed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie). Torka bort ev. fukt med en mjuk duk. För tillbe höret med piggar rekommenderas ett alkoholfritt desinfektionsspray, t ex SinAlc Sensitive från HIMED eller en likvärdig produkt för ytdesinfektion av

medicinska produkter. Om tillbehören är smutsiga och om det behövs 21 av andra skäl ska de rengöras med en borste och ett neutralt rengörings medel under rinnande vatten innan de desinficeras. Om tillbehören inte används kliniskt utan bara i hemmet kan de rengöras med en fuktig trasa, under rinnande vatten eller i mild tvållösning.

8. KONTRAINDIKATIONER / BIVERKNINGAR NOVAFON

ljudvågsenheter får inte användas för behandling vid:

- Öppna sår/eksem (i det område som ska behandlas)
- Arterioskleros (i det område som ska behandlas)
- Nuvarande risk för epileptiska anfall
- Graviditet
- Implantat (i det område som ska behandlas)
- Pacemakers Trombos (i det område som ska behandlas)
- Hjärtpacemakers
- Hjärtrytmrubbningar
- Tumörer, canceröst och inte canceröst
- Ställen med akut inflammation (i det område som ska behandlas)
- Akut uppblossande inflammatoriska sjukdomar
- Biverkningar: Observera att följande biverkningar kan uppstå i sällsynta fall: ·
- Förvärrad smärta/obehagskänslor · · ·
- Illamående/yrsel
- Hudirritationer
- Ryckningar/ofrivilliga muskelsammandragningar

Avbryt omedelbart behandlingen om du skulle uppleva någon av dessa biverkningar. Om symptomen kvarstår, kontakta en läkare. Tänk på att besvär till en början kan förvärras vid en smärtbehandling innan man känner av en förbättring. Observera att en lätt hudrodnad eller något varm hud inte bör ge anledning till oro. Det är en önskad effekt av den lokala vibrationsbehandlingen och beror på ökad genomblödning.

9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren är ensam ansvarig för att den här produkten uppfyller kraven för medicinsk utrustning i Klass I enligt förordning 2017/745/EU och UK MDR 2002. Kontakta oss om du misstänker att enheten orsakat en allvarlig incident. Som användare har du rätt att rapportera en sådan incident till din nationella behöriga myndighet (t.ex. Hälsoministeriet).

10. KONTAKT

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om du har några frågor.