



SVENSKA

BRUKSANVISNING SENSOROLLER

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. FÖRORD | 6. HÅLLBARHET |
| 2. LEVERANSENS INNEHÅLL | 7. RENGÖRING OCH DESINFICERING |
| 3. ANVÄNDNING | 8. KONTRAINDIKATIONER |
| 4. VIKTIG INFORMATION | 9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE |
| 5. MATERIALINFORMATION | 10. KONTAKT |

1. FÖRORD

NOVAFON Sensoroller-setet är ett komplement till de tillbehör som redan ingår i leveransen av NOVAFONs ljudvågsapparater för att behandla smärta lokalt med hjälp av vibrationer. De får endast användas tillsammans med en sådan produkt. Träningsmodulerna finns tillgängliga i antracitgrå och vitt. Läs noga igenom följande sidor så att du alltid kan använda tillbehören på rätt sätt.

2. LEVERANSENS INNEHÅLL

Sensoroller-setet består av följande delar: Adapter, Fästklämma, 3 rullar i olika färger, Bruksanvisning. Färgen visar hur hårda rullarna är: gul = mjuk; orange = medel; röd = hård. Det setet kan erhållas i vitt, antracit och svart (art.-nr. 7017/7037/7052).

3. ANVÄNDNING

Fäst det färdigmonterade Sensoroller-tillbehöret på NOVAFON ljudvågsapparat med adaptern. Fästklämman kan vridas inuti adaptern för att rikta tillbehöret optimalt. Håll fast adaptern med ena handen samtidigt som du vrider tillbehöret med den andra.

Rikta produkten så att den kan rullas i en rak linje över eller kring det område som ska behandlas när man håller den löst i handen. Det är viktigt att inte trycka

för hårt, eftersom produkten då inte rullar lika bra och dessutom kan skadas. Anpassa rullens hastighet och trycket och använd en rulle som är hård eller mjuk nog för patientens individuella behov. Behandla den tid som rekommenderas i bruksanvisningen till ljudvågsapparaten från NOVAFON.

Så här byter du rulle: När du vill ta av tillbehöret eller byta rulle ska du alltid skruva ut adaptern och tillbehöret först och sedan dra ut rullen ur hållaren.

För att byta rulle drar du försiktigt isär fästklämman i delningen och drar försiktigt ut rullen i ena sidan. Placera den nya rullen med ena sidan först i fästklämman och tryck sedan lätt på den andra sidan så att hela rullen snäpper fast. Akta så att du inte klämmer fingret mellan rullen och fästklämman. Kontrollera att den nya rullen verkligen sitter fast. Slå inte på apparaten förrän den vilar på den del av kroppen som ska behandlas, annars kan ljud uppstå.

3.1 AVSEDD ANVÄNDNING

Apparater och tillbehör från NOVAFON är avsedda för att lindra smärta och främja muskelavslappning för att lindra symtom vid:

- Akut smärta i muskuloskelettala systemet
- Kronisk smärta i muskuloskelettala systemet
- Neurorehabilitering
- Röst- och sväljterapi

3.2 TYPISKA ANVÄNDNINGSEXEMPEL

Med vår Sensoroller kan två väl beprövade behandlingsmetoder kombineras med varandra: Vibrationerna från NOVAFONs ljudvågsapparat lindrar smärta och genomblödningen främjas när de övre hudlagren stimuleras av Sensoroller-tillbehörens igelkottsliknande form. Rullarnas koniska spetsar stimulerar hudens yta samtidigt som vibrationerna från ljudvågsapparaten når djupare liggande vävnadsskikt. Rullarna finns i tre olika hårdheter så att intensiteten kan anpassas efter behandlingens syfte eller patientens behov. Rullarna kan bytas ut och monteras med fästklämman. Sensoroller är kompatibel med alla ljudvågsapparater från NOVAFON tillsammans med rätt adapter. Sensoroller finns tillgängliga i vitt och antracitgrå. Läs noga igenom följande sidor så att du alltid kan använda tillbehören på rätt sätt. Läs även all information i bruksanvisningen till ljudvågsapparaten från NOVAFON innan du använder tillbehören.

OBS: Vibrationsterapi lindrar främst symtom, men botar inte den underliggande sjukdomen. Användningen av Sensoroller ersätter inte ett besök hos läkaren.

OBS: Användning av lokal vibrationsterapi för muskelavslappning vid neurologiska sjukdomar eller röst- och sväljterapi bör endast utföras av kvalificerad

personal (terapeuter, läkare, vårdpersonal) eller efter detaljerad instruktion av en sådan person.

I alla fall används lokal vibrationsterapi som ett element i en holistisk terapip-lan där muskelavslappning krävs för ytterligare övningar och träningselement. NOVAFON -enheter kan användas av personer i åldern 6 och över. Barn måste övervakas. Detsamma kan gälla för personer med nedsatt kognitiv eller motorisk kontroll (som ofta förekommer hos patienter med spasticitet). OBSERVERA KON-TRAINDIKATIONERNA i kapitel 8 och anvisningarna i kapitel 6.

ANVÄND INTE för att behandla smärta eller svullnad av okänt ursprung. Kontakta i så fall en läkare för klargörande och diagnos.

4. VIKTIG INFORMATION

- Sensoroller ska bara användas tillsammans med ljudvågsapparater från NOVAFON.
- Läs även all information i bruksanvisningen till NOVAFON ljudvågsapparat.
- Använd inte hudkräm eller gel som kan blockera rullmekanismen.
- Stick alltid in tillbehöret i adaptern först och dra åt sedan fast dem på ljudvågs-apparaten från NOVAFON.
- När du behöver byta ut eller ta bort tillbehöret ska du alltid skruva ut adaptern med tillbehöret innan du drar ut tillbehöret ur adaptern.
- Tillbehören kan vridas inuti adaptern. För att vrida tillbehör inuti adaptern när de redan monterats på ljudvågsapparaten från NOVAFON håller du fast adap-tern med ena handen samtidigt som du skruvar på tillbehöret.
- Det är viktigt att inte trycka för hårt, eftersom produkten då kan skadas.
- Akta fingrarna så att du inte klämmer dig när du byter rulle.
- Förvara alltid Sensoroller-setet torrt och mörkt så att materialet inte åldras i förtid.
- Kontrollera regelbundet om tillsatserna är slitna och skadade. Skadade tillsat-serna får inte längre användas. Risk för skada.

5. MATERIALINFORMATION

Sensoroller från NOVAFON tillverkas av en speciell kvalitetsplast för medicinskt bruk.

6. HÅLLBARHET

Hållbarheten kan variera beroende på hur ofta produkten används. Alla enskilda delar ska kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna innan de används. Ersätt skadade och nötta delar i god tid. Förvara alltid Sensoroller-setet torrt och

mörkt så att materialet inte åldras i förtid. Observera att tillbehör betraktas som förbrukningsdelar och därför omfattas av en begränsad garanti.

7. RENGÖRING OCH DESINFICERING

För professionellt och kliniskt bruk ska NOVAFON Sensoroller rengöras och desinficeras före första användningen (se Manuell rengöring och desinficering). Om de återanvänds på flera personer måste tillbehören rengöras och desinficeras efter varje behandlingstillfälle. Observera att det tyvärr inte går att rengöra Sensoroller maskinellt.

För hemmabruk som inte är kliniskt kan tillbehören rengöras i mild tvållösning efter behov och när det syns att de är smutsiga.

OBSERVERA: Följ alltid respektive tillverkares anvisningar för rengöring och desinficering om du använder rengörings- och desinfektionsmedel för att rengöra produkten. Använd endast alkoholfria rengörings- och desinfektionsmedel (VAH- eller IHO-listade) på ömtåliga ytor.

MANUELL RENGÖRING OCH DESINFICERING

A. FÖRBEREDELSE: Ta ut Sensoroller ur fästklämman. Ta av adaptern.

B. FÖRBEHANDLING VID BEHOV: (t ex om ytan är mycket smutsig) Nödvändiga hjälpmedel: lämplig plastborste, rinnande vatten (min. dricksvattenkvalitet), ev. ett neutralt rengöringsmedel eller alkoholfria rengöringsdukar (för ömtåliga ytor, t ex Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Ta bort yttlig smuts med en plastborste under rinnande vatten. Mindre smuts kan tas bort med en särskild rengöringsduk.
- Kontrollera resultatet: Om det fortfarande finns synlig smuts upprepas förbehandlingen med ett neutralt rengöringsmedel. Skölj alla delar av tillbehöret under rinnande vatten och torka dem med en luddfri trasa.

C. RENGÖRING OCH DESINFICERING: Försäkra dig om att all synlig smuts är borta innan du desinficerar. Använd endast ett alkoholfritt ytdesinfektionsmedel (VAH- eller IHO-listat) för att rengöra och desinficera ömtåliga ytor (t ex SinAlc sensitiv, Hibomed; Rheosept-WD Plus Wipes, Wachendorff-Chemie).

- Behandla alla ytor på tillbehören och hållaren noga med desinfektionsmedlet. Kontrollera att medlet täcker alla ytor. Följ anvisningarna från desinfektionsmedlets tillverkare.
- Torka ev. av med en luddfri duk när medlet fått verka den tid som krävs.

8. KONTRAINDIKATIONER

Eftersom Sensoroller bara får användas tillsammans med ljudvågsapparater från

NOVAFON gäller samma kontraindikationer och biverkningar som i bruksanvisningen till NOVAFON ljudvågsapparat.

Man bör dessutom tänka på följande:

- Sensoroller ska inte användas på öppna sår eller på slemhinnor.
- Avbryt behandlingen vid obehag eller smärta.
- Observera att en lätt hudrodnad eller något varm hud inte bör ge anledning till oro. Det är en önskad effekt som beror på den ökade genomblödningen.

9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren är ensam ansvarig för att den här produkten uppfyller kraven för medicinsk utrustning i Klass I enligt förordning 2017/745/EU och UK MDR 2002. Kontakta oss om du misstänker att enheten orsakat en allvarlig incident. Som användare har du rätt att rapportera en sådan incident till din nationella behöriga myndighet (t.ex. Hälsoministeriet).

10. KONTAKT

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om du har några frågor.